



VelaShape II™

Cellulite

Treatment &

Body Contouring

Science. Results. Trust.



Syneron®

CANDELA®

The Technology

The Science Behind VelaShape Technology


The Science Behind VelaShape Technology 技術背後的科技

VelaShape II 採用4種技術結合為一

- Infrared light (IR) 紅外線 - 深入3mm加熱皮膚
- Bi-polar radio frequency (RF) 雙極射頻 - 深入加熱皮膚組織20mm
- Vacuum 真空吸力 - 準確傳送能量
- Massage mechanism 機械滾輪 - 重新改變結締組織

4合1技術

紅外線和真空吸力協助射頻，能短時間加熱結締組織至43°C，促進膠原蛋白增加，刺激細胞代謝，改善鬆弛皮膚同時減少脂肪體積。機械滾輪結合真空吸力，增加血液循環和淋巴流動，增加塑身效果同時帶來健康的皮膚。

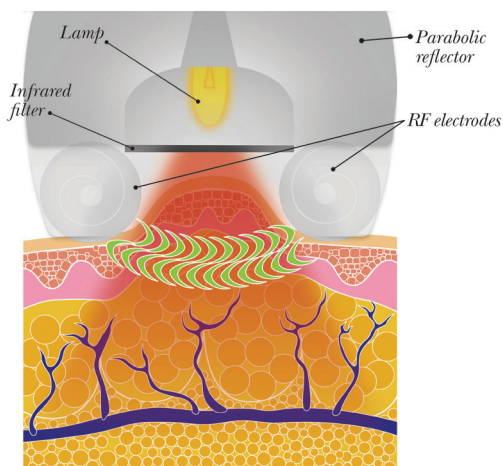

Mechanical Manipulation 機械操作

(真空吸力 +/- 機械滾輪)

- 促進纖維細胞活動性
- 促進血管擴張和氧份擴散
- 精確輸送能源至深層組織


Heating 加熱

(700-2000nm 紅外線 + 60W 雙極射頻)

- 刺激纖維細胞活躍性
- 重塑線條、縮小脂肪
- 改善皮膚紋理(整體膠原蛋白)

Four to Six Treatment Protocol 通過4-6次治療

- 臨床驗證有效擊退橙皮脂肪和減少圍周尺寸
- 每次治療20分鐘，即時可見效果

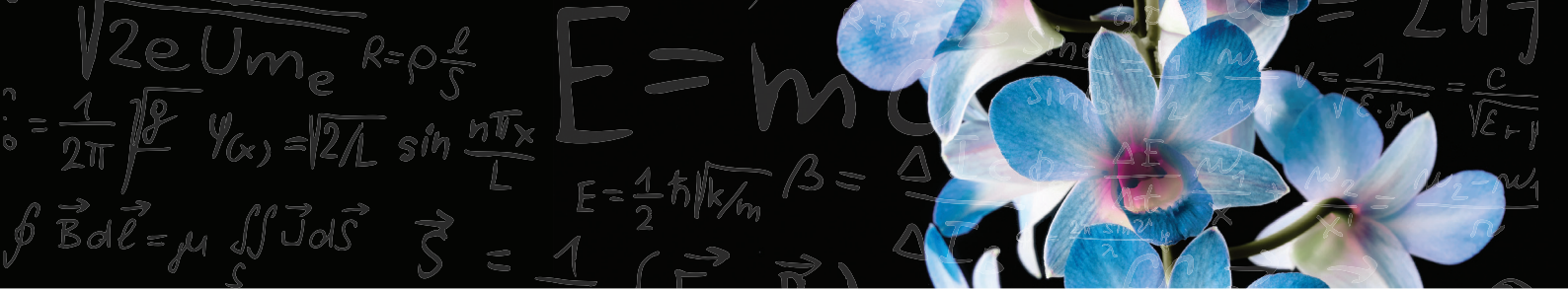

臨床驗證結果 安全性和有效性


VelaShape II治療一直被多個臨床研究中心進行測試，全球亦超過5萬以上患者使用。

- 最近一項研究，產後患者身體尺寸平均面積減少10%達97%的患者滿意效果
- 多數患者治療期間或之後，無任何不適
- 在5次治療後，高達60%改善皮膚紋理和減少橙皮脂肪凹凸不平

"我們已經看到了VelaShape帶來很大的成效。我們大多病人治療腹部平均減少5cm。"


Lori Brightman, M.D.
Board Certified Dermatologist, New York, NY

VelaShape II 溫度數據圖表在10-15mm 深度

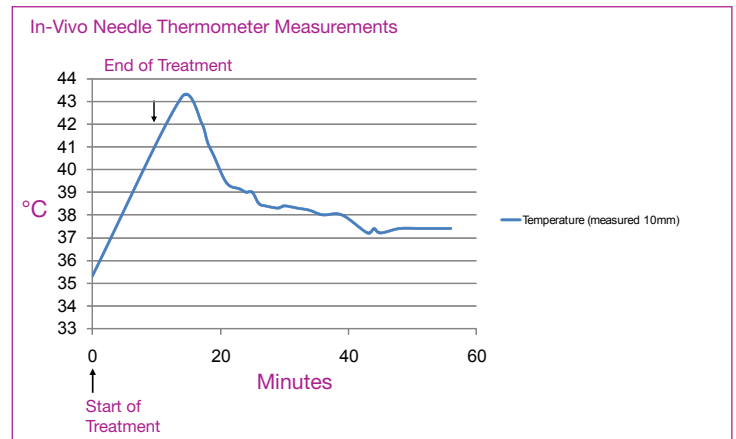

臨床結果顯示，能在短時間提升皮膚組織溫度超過40°C，治療完成後熱能效應仍然保持一段長時間，達到一個更佳의預期效果。

Photo courtesy of Lori Brightman, M.D.

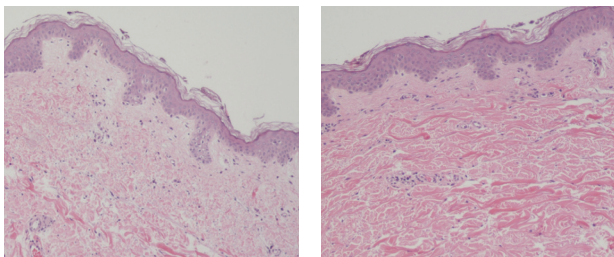

Histologic results one month post five treatments

Photo courtesy of Lori Brightman, M.D.



Before

Three months post five treatments


Photo courtesy of Maurice Adatto,



Before

Post six treatments

Photo courtesy of Lori Brightman, M.D.

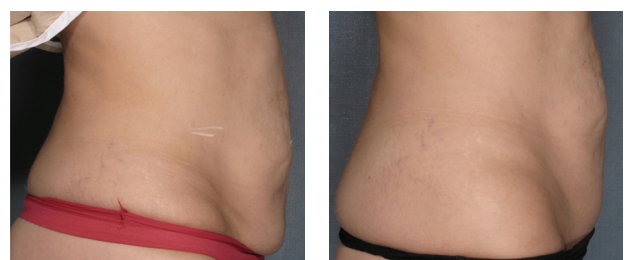

Before

Post five treatments



Science. Results. Trust.

System Specifications 系統規格

生產國家	Israel 以色列
製造商	Syneron
射頻(RF)能量	高達60W
紅外光(IR)	高達35W
紅外光(IR) 光譜	700-2000nm
負壓吸力	脈衝式
Vsmooth大治療	40 mm x 40mm
Vcontour小治療	30 mm x 30mm
儀器重量	27 kg. / 60 lbs.
儀器尺寸	W36 x D55 x H80 cm / 14.2 x 21.6 x 31.5"
使用電源	100/230 VAC 50/60 Hz; Single Phase



權威認證 美國FDA認證
歐盟CE認證

Vcontour™

用於小面積，小腿和手臂，
或加強Vsmooth治療效果

Clever Terminal™

顯示治療狀況和說明配件使
用時間，診斷系統的服務

Vsmooth™

用於大面積，如大腿、
臀部、腹部和背部



Syneron® **CANDELA®**
www.syneron.com | www.candelalaser.com

VelaShape II™



香港總代理: 九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈6樓618室 傳真(852) 3107 3018 香港專線(852) 3107 3038
電郵: info@red-beauty.com 網址: www.red-beauty.com www.facebook.com/RedBeautySlimming